



FUTURO™ AANPASBARE KNIESTABILISATOR

47550



Stabiliseert een geblesseerde of instabiele knie bij het bewegen.

IDEAAL VOOR:

Ondersteuning bij veelvoorkomende blessures, zoals verstuiking en overbelasting

HOOFDKENMERKEN:

- 1 Dubbele stabilisator voor ondersteuning in het midden en aan de zijkant.
 - 2 Verstelbare riemen voor een goede pasvorm.
 - 3 Reflecterende haaktabjes voor extra zichtbaarheid.
- Duurzame neopreenmix voor een sterke ondersteuning, verzachtende warmte en comfort.

MAAT:

Referentie	CNK	CM
47550	2715993	33.0-44.4



DRAAGINSTRUCTIES:



Leg de stabilisator over de knie met de gladde kant tegen de huid en met slechts 1 riempje aan de buitenkant van het been. Plaats de ronde opening over de knieschijf. Wikkel de middelste riem onder de knie en bevestig de haaksluiting aan de stabilisator.



Positioneer de knie in de knieschijfopening. Wikkel beide overblijvende buitenste banden onder de knie en bevestig de sluitingen aan de stabilisator. Verstel alle riemen totdat de brace strak maar comfortabel zit.

Beoogd gebruik: Biedt steun voor stijve, zwakke knieën, of bij letsels.

LET OP: Sommige mensen zijn gevoelig voor neopreen of neopreen-rubbermengsels. Stop het gebruik en raadpleeg een arts als er uitslag ontstaat.

Composition: Samenstelling: Neopreen, Staal, Nylon, Polyester.

Stop het gebruik en raadpleeg een arts als er ongemak of pijn ontstaat, of als de pijn/het ongemak aanhoudt of verergert.

3M en FUTURO zijn handelsmerken van 3M.

3M Belgium bvba/sprl
Afd. Consumer Health Care
www.3M.BE/futuro

3M Nederland B.V.
Afd. Consumer Health Care
www.3M.NL/futuro

