



FUTURO™ PERFORMANCE KNÆSTABILISATOR

47550



Hjælper med at give stabilisering til skadede eller ustabile knæ, når du er aktiv.

VELEGNET TIL:

Giver støtte til almindelige skader som forstuvning og overbelastning

NØGLEFUNKTIONER:

- 1 Dobbelte stabilisatorer giver medial og lateral støtte.
 - 2 Justerbare stropper for brugertilpasset pasform.
 - 3 Reflekterende stropper for øget synlighed.
- Det slidstærke neoprenblandingsmateriale giver stærk støtte, lindrende varme og komfort.

STØRRELSESVALG:

Varenr	CM
215074	33.0-44.4



SÅDAN BRUGES DEN:



Læg støtten over knæet med den glatte side mod huden og den enkelte stropp på ydersiden af benet. Placer det runde hul over knæskallen. Vikl den midterste stropp under knæet, og fastgør kroglukningen til støtten.



Placer knæet i støttelommen. Vikl begge de tilbageværende yderstropper omkring benet under knæet, og fæstn lukningerne til støtten. Juster alle stropper, indtil den sidder til, men stadig føles behagelig.

Tilsigtet anvendelse: Hjælper med at give støtte til stive, svage eller skadede knæ.

OBS! Nogle mennesker kan være overfølsomme overfor neopren eller gummi der indeholder neopren. Hvis der opstår udslæt, skal du ophøre med brugen og søge læge.

Materialesammensætning: Neopren, Stål, Nylon, Polyester.

Hvis du oplever smerter som følge af brug, og smerterne varer ved eller øges, skal du ophøre med brugen og søge læge.

3M og FUTURO er varemærker tilhørende 3M.

3M a/s
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Denmark

