



FUTURO™ PERFORMANCE JUSTERBAR KNÄSTÖD

47550

 MODERAT
STÖD



Hjälper till att stabilisera skadat eller instabilt knä under träning.

PERFEKT FÖR:

Ger stöd vid vanliga knäskador

VIKTIGA FUNKTIONER:

- ① Dubbla stabilisatorer för medialt och lateralt stöd.
- ② Justerbara remmar för anpassad passform.
- ③ Reflekterande kardborrefästen för ökad synlighet.
- Slitstark neoprenblandning för stabilt stöd, värme och komfort.

STORLEK:

Artikel Nummer	CM
47550	33.0-44.4



ANVÄNDNING:



Placera stödet över knät med den släta sidan mot huden och det mellersta bandet på utsidan av knät. Rikta in det runda hålet över knäskålen. Dra åt det mellersta bandet på baksidan av knät och sätt fast kardborrefästet på stödet.



Positionera knät i stödet. Linda de två återstående yttre banden under och över knät och fäst banden på stödet. Justera alla band tills stödet sitter stabilt men ändå bekvämt.

Avsedd användning: Ger stöd till stela, svaga eller skadade knän.

VAR FÖRSIKTIG! En del personer kan vara överkänsliga mot produkter som innehåller neopren. Vid hudutslag, avbryt användning och rådfråga en läkare.

Material: Neoprene, Steel, Nylon, Polyester.

Om obehag eller smärta uppstår, kvarstår eller ökar, avbryt användningen och kontakta läkare.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.

3M Svenska AB
Herrjärva torg 4,
170 67 Solna
Sweden

3M