



FUTURO™ PERFORMANCE STABILOIVA POLVITUKI

47550

 KESKITASON
TUKI



Auttaa tukemaan vahingoittunutta epävakaata tai polvea aktiviteettien aikana.

SOPII KÄYTETTÄVÄKSI:

Tukemaan lieviä vaurioita, kuten venähdyksiä

OMINAISUUDET:

- 1 Kaksinkertainen vakautusjärjestelmä antaa sekä mediaalista että lateraalista tukea.
 - 2 Tuki on helppo säätää istuvaksi.
 - 3 Heijastavat nauhat parantavat näkyvyyttä.
- Kestävä neopreeniseos tarjoaa vahvan tuen, miellyttävän lämmön ja käyttömukavuuden.

KOKO:

Tuotekoodi	CM
47550	33.0-44.4



TUEN ASETTAMINEN:



Aseta tuki polven päälle sileä pinta ihoa vasten ja niin, että yksittäinen hihna on säären ulkopinnalla. Aseta pyöreä reikä polvilumpion päälle. Kiedo keskimmäinen hihna polven alta ja kiinnitä koukkunauha vakaajaan.



Kiedo kaksi muuta ulkohihnaa polven alta ja kiinnitä kiinnikkeet vakaajaan. Säädä kaikkia hihnoja, kunnes tuki asettuu lujasti mutta mukavasti.

Käyttötarkoitus: Auttaa tukemaan jäykkää, heikkoa tai vahingoittunutta polvea.

VAROITUS: Jotkut henkilöt voivat olla yliherkkiä neopreenille tai neopreeniseoskumille. Jos saat ihottumaa, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

Koostumus: neopreeni, teräs, nailon, polyesteri.

Jos käyttö aiheuttaa tai lisää epämiellyttävää oloa tai kipua, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

3M ja FUTURO ovat 3M:n tuotemerkkejä.

Suomen 3M Oy,
Keilaranta 6,
02150 ESPOO

3M