



FUTURO™ JUSTERBART RYGGSTÖD

46820



MÅTTLIGT
STÖD



VENTILERANDE
MATERIAL

Avsedd användning: Hjälper som stöd till en stel, spänd eller värkande rygg.

VAR FÖRSIKTIG! En del personer kan vara överkänsliga mot neoprengummi eller gummi som innehåller neoprenblandning. Vid hudutslag, avbryt användning och rådfråga en läkare.

Material: Nylon, Polyester, Neopren, Spandex, EVA, Polyuretanskum, TPE + POM + Nylon, Polypropen, Metall.

Om obehag eller smärta uppstår, kvarstår eller ökar, avbryt användningen och kontakta läkare.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.

Dubbelt dragsnörsystem för snabb och enkel justering.

PERFEKT FÖR:

Lyft och vardagsaktiviteter

VIKTIGA FUNKTIONER:


- 1 Avtagbara ländryggsdynor ger vaddering och ytterligare stöd.
- Stretch i sidorna hjälper till att hålla stödet bekvämt på plats.
- Passar ett midjemått på upp till 130 cm.

STORLEK:

Artikel Nummer	CM
46820	73.7-129.5




ANVÄNDNING:

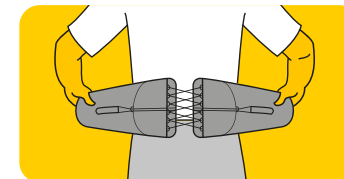

Om önskas, ta bort dynorna från stödet. Centrera snörningen över ryggraden.



Dra stödets sidor runt midjan och fäst med kardborrebandet. Stödet skall sitta åt men ändå vara bekvämt.

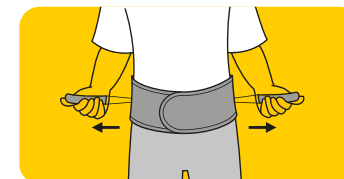

Lossa snörningen på båda sidorna och dra rakt ut till önskad kompression.



För båda snörerna framåt och fäst på motsatt sida. Justera stödet vid behov.

3M Svenska AB
Herrjärva torg 4,
170 67 Solna
Sweden

