



FUTURO™ SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE

46820



SOPORTE
MODERADO

Doble sistema de cierre con cordones para un ajuste sencillo y rápido.

IDEAL PARA:

Actividades diarias, levantar pesos, inclinarse.

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Almohadillas lumbares acolchadas extraíbles que amortiguan y proporcionan sujeción adicional.
- Los paneles laterales elásticos ayudan a reducir el deslizamiento y la formación de pliegues.
- Para una circunferencia de cintura máxima de 129,5 cm.

TOMAR LA MEDIDA:

CÓDIGO NACIONAL	CM
162421.5	73.7-129.5




MATERIAL
TRANSPIRABLE

Uso previsto: Compresión de la región lumbar rígida, tensa o con dolor.

PRECAUCIÓN: Algunas personas pueden ser sensibles al neopreno o a la mezcla de goma y neopreno. En caso de erupción cutánea, dejar de utilizar y consultar a un médico.

Composición: Nylon, Polyester, Neoprene, Spandex, EVA, Polyurethane Foam, TPE+POM+Nylon, Polypropylene, Metal
Si empieza a sentir malestar o dolor, o bien estos síntomas persisten o aumentan, deje de usarlo y consulte a un médico.
3M y FUTURO son marcas registradas de 3M.


CÓMO UTILIZAR EL SOPORTE:

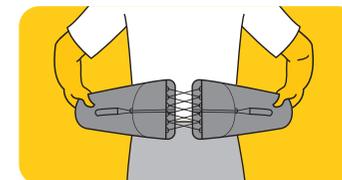

Elimine los apósitos del interior si lo desea. Centre los cordajes sobre el centro de la columna.



Envuelva la faja alrededor de la cintura y ancle el gancho hasta que quede cómodo pero firme.

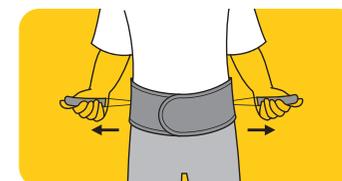

Suelte las correas de cordones en cada lado y tire hacia fuera hasta alcanzar el nivel de ajuste necesario.



Traiga hacia adelante las correas de cordones y átelas. Ajuste el soporte como necesite.

3M España
c/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027 Madrid

