



FUTURO™ JUSTERBAR RYGGSTØTTE

46820



Dobbelt snøresystem for rask og enkel justering.

IDEELL FOR:

Bøying, løfting, hverdagsaktiviteter

NØKKELEGENSKAPER:

- 1 Avtagbar korsryggpolstring gir demping og ekstra støtte.
- Sidestrekkanter gir mindre forskyvninger og bulker.
- Kan brukes på midjer opptil 130 cm.

STØRRELSER:

Category Number	CM
46820	73.7-129.5



PUSTENDE
MATERIALE

Tiltent bruk: Støtte for stiv, forstrukket eller vond rygg.


FORSIKTIG: Noen personer kan være følsomme for neopren eller blandinger som inneholder neopren. Hvis du får utslett, stopp bruken og oppsøk lege.

Composition: Nylon, Polyester, Neoprene, Spandex, EVA, Polyurethane Foam, TPE+POM+Nylon, Polypropylene, Metal

Hvis ubehag eller smerter oppstår, vedvarer eller øker, må du avslutte bruken og kontakte lege.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.


VED BRUK:

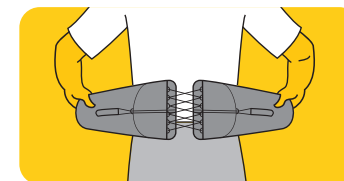

Fjern putene på innsiden av støtten hvis ønskelig. Snøring plassert over midten av ryggraden.



Trekk bandasjen rundt midjen og fest borrelåsen i en komfortabel, men tett posisjon.

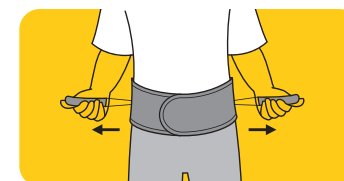

Løsne trekkstroppene på hver side og dra i en utovergående bevegelse til bøylen er på ønsket støttenivå.



Trekk stroppen fremover og fest den. Juster støtten etter behov.

3M Norge AS
Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm
Tlf: 06384

