



FUTURO™ CINTURA LOMBARE REGOLABILE

46820



SUPPORTO
MODERATO

Sistema con lacci doppi per regolazioni facili e rapide.

IDEALE PER:

Piegamento, sollevamento e attività quotidiane

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- 1 Cuscinetti lombari rimovibili che fungono da imbottitura e ulteriore supporto.
- Gli inserti elastici laterali contribuiscono a evitare che il supporto scivoli o si pieghi.
- Si adatta a un girovita fino a 130 cm.

TAGLIA:

Codice Prodotto	CM
46820	73.7-129.5




MATERIALE
TRASPIRANTE

Destinazione d'uso: Per supportare la schiena in caso di rigidità, strappo o dolore.

ATTENZIONE: alcune persone possono essere sensibili al neoprene o alla gomma in miscela di neoprene. In caso di arrossamento interrompere l'uso e consultare un medico.

Composition: Nylon, Polyester, Neoprene, Spandex, EVA, Polyurethane Foam, TPE+POM+Nylon, Polypropylene, Metal
Se compaiono, persistono o aumentano dolori e fastidi, interrompere immediatamente l'utilizzo del supporto e consultare il medico.
I prodotti della linea 3M Futuro sono Dispositivi Medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
Comunicazione tecnico-scientifica riservata a Professionisti sanitari, Farmacisti e Fisioterapisti.
3M and FUTURO are trademarks of 3M.


COME INDOSSARLO:

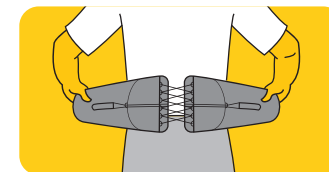

Rimuovere dal tutore gli inserti imbottiti, se lo si desidera. Centrare i lacci sulla metà della colonna vertebrale.



Avvolgere i pannelli intorno ai fianchi e fissare le chiusure a strappo in modo confortevole ma stretto.

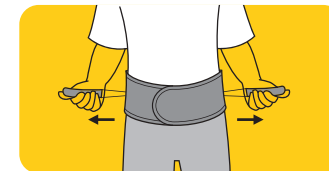

Rilasciare gli strappi con i lacci su ogni lato e tirare verso l'esterno finché verrà raggiunto il livello di supporto desiderato.



Tirare in avanti gli strappi e fissarli. Aggiustare il supporto come si desidera.

3M Office
Via N. Bobbio 21
20096 Pioltello MI
www.3mitalia.it/futuro

