



FUTURO™ CEINTURE LOMBAIRE AJUSTABLE

46820



Système à double cordon pour ajustement simple et rapide.

INDIQUÉ POUR:

Flexion, port de charge, activités quotidiennes

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- ① Les coussinets lombaires amovibles offrent un amorti et un soutien supplémentaires.
- Les panneaux extensibles latéraux aident à minimiser les plis et le glissement.
- Convient pour un tour de taille jusqu'à 130 cm.

TAILLES:

Category Number	cm
46820	73.7-129.5



**MATÉRIAU
RESPIRANT**

Utilisation prévue: Aide à soutenir un dos raide, tendu ou douloureux.


MISE EN GARDE: Certaines personnes peuvent être sensibles au néoprène ou au mélange néoprène-caoutchouc. En cas d'éruption cutanée, interrompre l'utilisation et consulter un médecin.

Composition: Nylon, Polyester, Neoprene, Spandex, EVA, Polyurethane Foam, TPE+POM+Nylon, Polypropylene, Metal

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.


MODE D'EMPLOI:

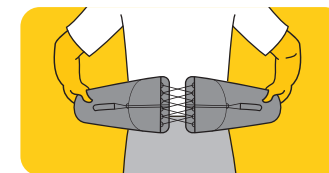

Retirez les coussinets à l'intérieur du support, si désiré. Centrez le laçage au milieu de la colonne vertébrale.



Enroulez les panneaux autour de la taille et fixez l'attache à crochets et à boucles dans une position ferme mais confortable.

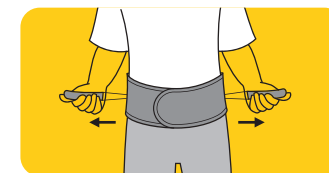

Relâchez les sangles à cordon de chaque côté et tirez vers l'extérieur jusqu'à ce que l'orthèse soit au niveau de support souhaité.



Ramenez les sangles vers l'avant et fixez-les. Ajustez le support suivant les besoins.

3M France
Marché Bien Etre et Santé pour le Grand Public
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
542 078 555 RCS Pontoise

