



FUTURO™ HELPOSTI SÄÄDETTÄVÄ SELKÄTUKI

46820



KESKITASON
TUKI

Kaksinkertaisen nauhajärjestelmän ansiosta säätö on helppoa ja nopeaa.

SOPII KÄYTETTÄVÄKSI:
taivutuksiin, nostamiseen, arkiaskareisiin

OMINAISUUDET:

- 1 Ristiselän irrotettavat tyynyt pehmustavat ja antavat lisätukea.
- Sivujen joustavat osat vähentävät liukumista ja kokoon painumista.

KOKO:

Tuotekoodi	CM
46820	73.7-129.5



HENGITTÄVÄ
MATERIAALI

Käyttötarkoitus: jäykän, venähtäneen tai särkevän selän tukeminen.


VAROITUS: Jotkut henkilöt voivat olla yliherkkiä neopreenille tai neopreeniseoskumille. Jos saat ihottumaa, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

Koostumus: nailon, polyesteri, neopreeni, elastaani, EVA, polyuretaanivaahdot, TPE + POM + nailon, polypropeeni, metalli.

Jos käyttö aiheuttaa tai lisää epämiellyttävää oloa tai kipua, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

3M ja FUTURO ovat 3M:n tuotemerkkejä.


TUEN ASETTAMINEN:

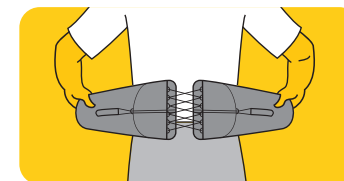

Voit halutessasi irrottaa tuen sisäpuoliset pehmusteet. Kohdista kiinnitysnauhat selkärangan keskiosan kohdalle.



Kiedo liuskat vyötärön ympärille ja kiinnitä tarrakiinnitys mukavasti mutta tukevasti.

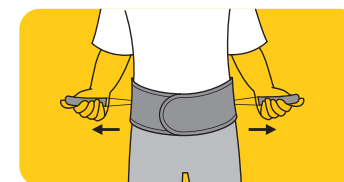

Irrota kiinnityshihnat molemmilta puolilta ja vedä niitä ulospäin, kunnes tuki tuntuu sopivalta.



Vedä kiinnitysnauhvoja eteenpäin ja kiinnitä ne. Säädä tukea tarvittaessa.

Suomen 3M Oy,
Keilaranta 6,
02150 ESPOO

3M