



FUTURO™ LET JUSTERBAR RYGSTØTTE

46820



Dobbelt trådtræksystem til hurtige og nemme justeringer.

VELEGNET TIL:

Buk, løft og hverdagsaktiviteter

NØGLEFUNKTIONER:

- 1 Aftagelige lændepuder, som giver polstring og ekstra støtte.
- Sidestrækpaneler hjælper med at minimere at støtten glider.
- Passer op til livvidde på 130 cm.



ÅNDBART
MATERIALE

STØRRELSESVALG:

Varenr	CM
46820NORD	73.7-129.5



Tilsigtet anvendelse: Støtte til stiv, forstuvet eller smertefuld ryg.


OBS! Nogle mennesker kan være overfølsomme overfor neopren eller gummi der indeholder neopren. Hvis der opstår kløe, skal du ophøre med brugen og søge læge.

Materialesammensætning: Nylon, Polyester, Neopren, Spandex, EVA, Polyuretanskum, TPE+POM+Nylon, Polypropylen, Metal.

Hvis du oplever smerter som følge af brug, og smerterne varer ved eller øges, skal du ophøre med brugen og søge læge.

3M og FUTURO er varemærker tilhørende 3M.


SÅDAN BRUGES DEN:

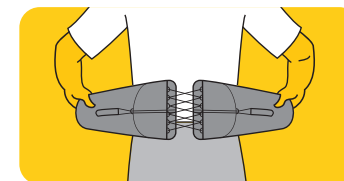

Fjern støttebindets indvendige puder efter behov. Centrér snøresystemet over ryggraden.



Vikl panelerne omkring taljen og fæstn krog og løkke-lukningen i en behagelig men stram position.

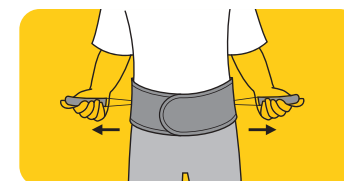

Frigør stropperne på begge sider, og træk i udadgående retning, indtil rygstøtten giver den ønskede støtte.



Før stropperne frem og fæstn dem. Juster støtten efter behov.

3M a/s
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Denmark

3M