



# FUTURO™ CEINTURE LOMBAIRE STABILISATRICE

46815-16



MATÉRIAU  
RESPIRANT

Utilisation prévue: Aide à soutenir un dos raide, tendu ou douloureux.

Composition: Polyester, Nylon, Polyuréthane, Panneau de fibres, Spandex, Acrylique.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

Les coussinets de soutien aident à cibler les muscles endoloris et douloureux.

## INDIQUÉ POUR:

Marche, activités à faible impact, maintenir une bonne position du corps

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:


- 1 Conçue avec des coussinets de soutien pour aider à cibler les muscles endoloris et douloureux sans exercer de pression directement sur la colonne vertébrale.
  - 2 Réglable pour un ajustement et un soutien personnalisés.
  - 3 Le panneau dorsal distribue le soutien de manière uniforme.
- Design élégant. Non encombrant. Ne limite pas les mouvements.

## TAILLES:

Référence	PHC	Taille	CM
46815	4464618	S/M	73.6-99.1
46816	4464624	L/XL	99.1-127.0




## MODE D'EMPLOI:

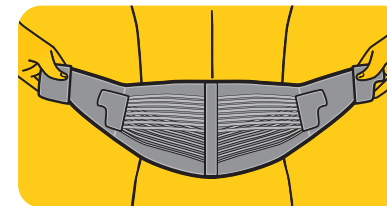

Ouvrez les sangles principales et détachez les sangles de fixation latérales. Centrez le support le long du bas du dos, en plaçant les coussinets Support Cushion de chaque côté de la colonne vertébrale et le bord incurvé du panneau pointant vers le bas.



Enroulez les sangles principales autour de la taille et fixez l'attache à crochets sur l'estomac.

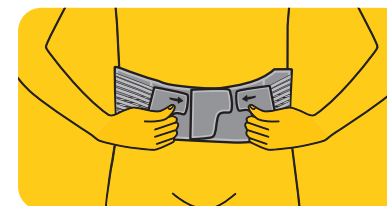

Tirez les sangles de fixation latérales vers l'avant et fixez-les le long des panneaux avant du support. Ajustez le positionnement des sangles de fixation latérales pour obtenir un niveau de support adapté à vos besoins.

3M (Suisse) S.à r.l.  
Consumer Health Care  
Eggstrasse 93  
8803 Rüslikon  
www.3msuisse.ch/futuro

