



# FUTURO™ COMFORT RYGGSTÖD

46815-16



STABILT  
STÖD

Ländryggsdynor som ger stöd åt  
ömma, värkande muskler.

## PERFEKT FÖR:

Promenader, skonsamma aktiviteter och för  
bättre hållning

## VIKTIGA FUNKTIONER:

- 1 Design med ländryggsdynor som ger stöd åt ömma, värkande muskler utan att applicera tryck direkt på ryggraden.
  - 2 Justerbar för bra passform och stöd.
  - 3 Ryggpanelen fördelar stödet jämnt.
- Elegant, slim modell som inte begränsar rörligheten.

## STORLEK:

Artikel Nummer	Storlek	CM
46815	S/M	73.6-99.1
46816	L/XL	99.1-127.0



VENTILERANDE  
MATERIAL


Avsedd användning: Hjälper som stöd till en stel, spänd eller värkande rygg.

Material: Polyester, Nylon, Polyuretan, Fiberboard, Spandex, Akryl.


Om obehag eller smärta uppstår, kvarstår eller ökar, avbryt användningen och kontakta läkare.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.


## ANVÄNDNING:

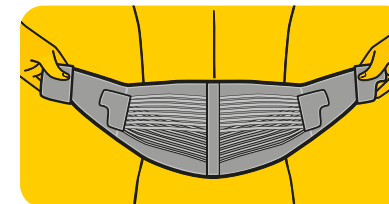

Öppna upp stödet och lossa de elastiska banden på båda sidorna. Centrera stödet på nedre delen av ryggen och placera ländryggskuddarna på båda sidor av ryggraden och så att den svängda kanten pekar nedåt.

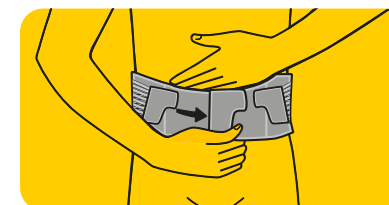

Dra åt stödet tight runt kroppen och fäst Kardborrebandet över magen.

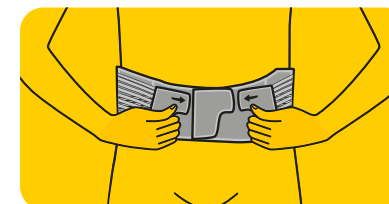

Dra de elastiska sidobanden framåt och fäst på stödets framsida. Justera placeringen av sidobanden för att uppnå rätt stödnivå för dina behov.

3M Svenska AB  
Herrjärva torg 4,  
170 67 Solna  
Sweden

**3M**