



FUTURO™ COMFORT STABILISERENDE RYGGSTØTTE

46815-16



PUSTENDE
MATERIALE

Tiltenkt bruk: Støtte for stiv, forstrukket eller vond rygg.

Composition: Polyester, Nylon, Polyurethane, Fiberboard, Spandex, Acrylic.
Hvis ubehag eller smerter oppstår, vedvarer eller øker, må du avslutte bruken og kontakte lege.
3M and FUTURO are trademarks of 3M.

Støttepolstring for ømme og verkende muskler.

IDEELL FOR:

Spasering, lette aktiviteter, kroppsholdning

NØKKELEGENSKAPER:


- 1 Utformet med støttepolstring som virker på ømme og verkende muskler uten å trykke direkte på ryggraden.
 - 2 Justerbar for optimal passform og støtte.
 - 3 Ryggpanel fordeler støtten jevnt.
- Glatt, smidig design som gir bevegelsesfrihet.

STØRRELSER:


Category Number	Størrelse	CM
46815	S/M	73.6-99.1
46816	L/XL	99.1-127.0




VED BRUK:

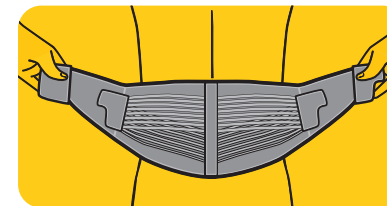

Åpne hovedstroppene og ta av festestroppene på siden. Senterstøtte langs nedre del av ryggen, med Support Cushion puter på hver side av ryggraden, og den buede kanten av panelet pekende nedover.

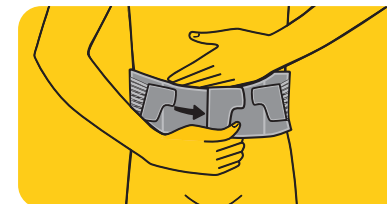

Vri hovedstroppene tett rundt midjen og fest borrelåsen over magen.

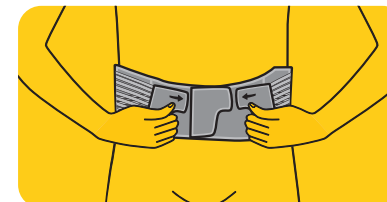

Trekk sidestroppene fremover og fest dem langs frontpanelene på støtten. Juster plasseringen av sidefestene for å oppnå den riktige støtten for dine behov.

3M Norge AS
Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm
Tlf: 06384

