



# FUTURO™ CINTURA DI SOSTEGNO LOMBARE

46815-16



Le imbottiture del supporto aiutano ad agire sul punto dolente e sui muscoli infiammati

## IDEALE PER:

Camminata, attività a basso impatto, postura

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- 1 Le imbottiture del supporto aiutano ad agire sul punto dolente e sui muscoli infiammati senza premere direttamente sulla colonna vertebrale.
  - 2 Regolabile per un adattamento e un supporto personalizzati.
  - 3 Il pannello posteriore distribuisce il supporto in modo regolare.
- Il design liscio e non ingombrante non limita i movimenti.

## TAGLIA:

| Codice Prodotto | Taglia | CM         |
|-----------------|--------|------------|
| 46815           | S/M    | 73.6-99.1  |
| 46816           | L/XL   | 99.1-127.0 |



Destinazione d'uso: Per supportare la schiena in caso di rigidità, strappo o dolore.

Composition: Polyester, Nylon, Polyurethane, Fiberboard, Spandex, Acrylic. Se compaiono, persistono o aumentano dolori e fastidi, interrompere immediatamente l'utilizzo del supporto e consultare il medico.

I prodotti della linea 3M Futuro sono Dispositivi Medici marcati CE.

Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.


Comunicazione tecnico-scientifica riservata a Professionist sanitari, Farmacisti e Fisioterapisti.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.



MATERIALE  
TRASPIRANTE


## COME INDOSSARLO:

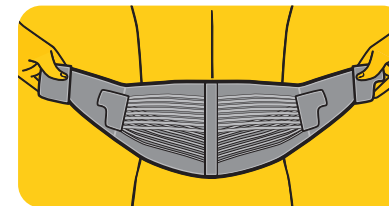

Aprire gli strappi principali e staccare gli strappi laterali. Centrare il tutore sulla parte lobare della schiena, con i cuscinetti di supporto ai lati della colonna vertebrale e i lati ricurvi del cuscinetto orientati verso il basso.



Chiudere gli strappi principali avvolgendoli intorno ai fianchi e fissare le chiusure all'altezza dello stomaco.

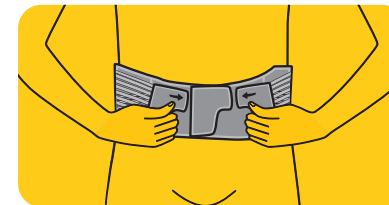

Tirare in avanti gli strappi laterali e assicurarli al pannello frontale del tutore. Aggiustare il posizionamento degli strappi per permettere il corretto livello di supporto in base alle esigenze.

3M Office  
Via N. Bobbio 21  
20096 Piofello MI  
[www.3mitalia.it/futuro](http://www.3mitalia.it/futuro)

