



FUTURO™ COMFORT STABILOIVA SELKÄTUKI

46815-16



Helppo kohdistaa kipeisiin ja särkeviin lihaksiin pehmusteiden ansiosta.

SOPII KÄYTETTÄVÄKSI:

kävelyyn, vähärasitteisiin aktiviteetteihin, ryhdin parantamiseen

OMINAISUUDET:

- 1 Pehmeitä hyödyntävä muotoilu auttaa kohdentamaan vaikutuksen kipeisiin ja särkeviin lihaksiin eikä paina suoraan selkäranka.
- 2 Säädettävä sopivan istuvuuden ja tuen löytämiseksi.
- 3 Taustaosa jakaa tuen tasaisesti.
 - Sileä, kompakti muotoilu ei rajoita liikkumista.

KOKO:

| Tuotekoodi | Koko | CM |
|------------|------|------------|
| 46815 | S/M | 73.6-99.1 |
| 46816 | L/XL | 99.1-127.0 |




HENGITTÄVÄ
MATERIAALI

Käyttötarkoitus: Jäykän, venähtäneen tai särkevän selän tukeminen.

Koostumus: polyesteri, nailon, polyuretaani, kuitulevy, elastaani, akryyli.
Jos käyttö aiheuttaa tai lisää epämiellyttävää oloa tai kipua, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.
3M ja FUTURO ovat 3M:n tuotemerkkejä.


TUEN ASETTAMINEN:

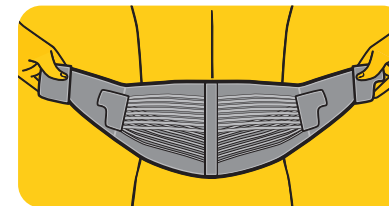

Avaa päähihnat ja irrota kiristettävät sivuhihnat. Kohdista tuki alaselän suuntaisesti niin että Support Cushion™ -pehmusteet ovat selkärangan molemmin puolin ja liuskan kaartuva reuna osoittaa alaspäin.



Kiedo päähihnat tukevasti vyötärön ympäri ja kiinnitä koukkunauha vatsan päälle.

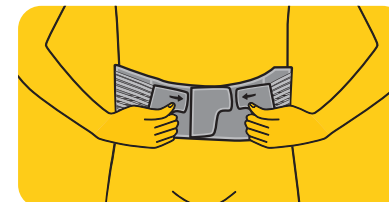

Vedä kiristettävät sivuhihnat eteenpäin ja kiinnitä ne tuen etuluskojen suuntaisesti. Säädä kiristettävät hihnat niin että saavutat tarvittavan tuen.

Suomen 3M Oy,
Keilaranta 6,
02150 ESPOO

3M