



# FUTURO™ STABILISERENDE RUGBANDAGE

46815-16



STEVIGE  
STEUN

**Drukkussentjes verlichten vermoeide, pijnlijke spieren.**

## IDEAAL VOOR:

Lopen, activiteiten met een lichte fysieke belasting, houdingscorrectie

## HOOFDKENMERKEN:

- 1 De drukkussentjes verlichten vermoeide, pijnlijke spieren zonder rechtstreeks druk uit te oefenen op de ruggengraat.
  - 2 Verstelbaar voor een goede pasvorm en ondersteuning.
  - 3 Rugpaneel voor gelijkmatige ondersteuning.
- Gestroomlijnde, dunne vormgeving die de bewegingen niet belemmert.

## MAAT:

Referentie	CNK	Maat	CM
46815	2251494	S/M	73.6-99.1
46816	2251502	L/XL	99.1-127.0




ADEMEND  
MATERIAAL

Beoogd gebruik: Ter ondersteuning van een stijve, geblesseerde of pijnlijke rug.

Samenstelling: Polyester, Nylon, Polyurethaan, Vezelplaat, Spandex, Acrylic.  
Stop het gebruik en raadpleeg een arts als er ongemak of pijn ontstaat, of als de pijn/het ongemak aanhoudt of verergert.  
3M en FUTURO zijn handelsmerken van 3M.


## DRAAGINSTRUCTIES:

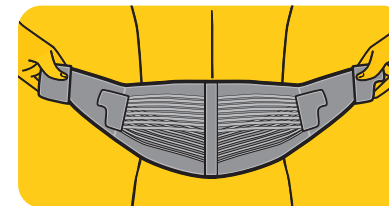

Open de hoofdriempjes en maak de buikriempjes langs de zijkant los. Centreer de bandage over de onderrug met de drukkussentjes langs weerszijden van de ruggengraat en de gebogen rand van het paneel naar beneden gericht.



Wikkel de hoofdriempjes nauwsluitend rond de taille en bevestig de haaksluiting op de buik.

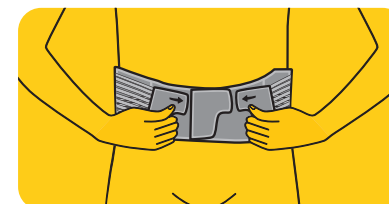

Trek de zijdelingse buikriempjes naar voor en bevestig ze op de frontpanelen van de bandage. Pas de sluiting van de buikriempjes aan om de juiste steun voor uw behoeften te bekomen.

3M Belgium bvba/sprl  
Afd. Consumer Health Care  
www.3M.BE/futuro

3M Nederland B.V.  
Afd. Consumer Health Care  
www.3M.NL/futuro

