



FUTURO™ COMFORT STABILISERENDE RYGSTØTTE

46815-16



ÅNDBART MATERIALE

Støttende polstringspuder hjælper målrettet ømme, smertende muskler.

VELEGNET TIL:

Gang, aktiviteter med lette stød, korrekt kropsholdning

NØGLEFUNKTIONER:


- 1 Designet med support-beskyttelsespudder, der hjælper med at lindre ømme muskler uden at placere tryk direkte på rygraden.
 - 2 Justerbar for brugertilpasset pasform og støtte.
 - 3 Bagsiden fordeler støtten jævnt.
- Det slanke design hæmmer ikke fri bevægelse.

STØRRELSESVALG:

Varenr	Størrelse	CM
213024	S/M	73.6-99.1
213026	L/XL	99.1-127.0




SÅDAN BRUGES DEN:

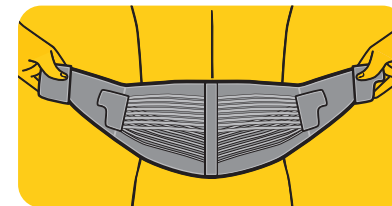

Åbn de primære stropper, og løs de stropperne i siden. Centrér støtten på den nedre del af ryggen med Support Cushion-puderne på hver sin side af rygraden og panelets buede kant nedad.



Vikl de primære stropper fast om taljen, og fastgør krogglukningen over maven.

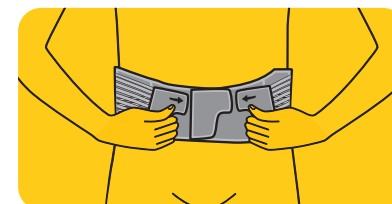

Træk sidestropperne fremad, og fæst dem langs støttens frontpaneler. Juster placeringen af sidestropperne for at opnå den helt rigtige støtte til dit behov.

Tilsigtet anvendelse: Støtte til stiv, forstuvet eller smertefuld ryg.

Materialesammensætning: Polyester, Nylon, Polyurethan, Fibrebræt, Spandex, Acryl.

Hvis du oplever smerter som følge af brug, og smerterne varer ved eller øges, skal du ophøre med brugen og søge læge.

3M og FUTURO er varemærker tilhørende 3M.

3M a/s
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Denmark

