

FUTURO™ **BANDAGE DU POIGNET**

46709





Soutient un poignet raide, faible ou blessé.

INDIQUÉ POUR:

Soutien général, activités quotidiennes

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Deux sangles réglables pour une mise en place ajustée.
- 2 Design profilé.
- Aide à protéger le poignet.

TAILLES:

Référence	PHC	СМ
46709	4464601	14.0-24.1

Mesurer le tour du poignet.



MODE D'EMPLOI:



Ouvrez la sangle principale et secondaire. Positionnez le coussinet sur la base de la paume de la main, à la pliure des articulations. Enroulez la sangle principale et fixez-la.



Enroulez la sangle secondaire et fixez-la. Ajustez afin d'obtenir le niveau de support souhaité.

3M (Suisse) S.à r.l.

Eggstrasse 93

8803 Rüschlikon

Consumer Health Care

www.3msuisse.ch/futuro

Utilisation prévue: Pour soutenir un poignet raide, faible ou blessé

 $\textbf{AVERTISSEMENT: Ce produit contient du la tex en caoutchouc naturel pouvant entra \hat{\textbf{i}} ner des réactions aller giques.}$

Composition: Nylon, Caoutchouc, Polyester, Coton, Polyuréthane.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin. 3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

3M