



FUTURO™ MUÑEQUERA

46709

 **SOPORTE
MODERADO**



Proporciona soporte a muñecas rígidas, debilitadas o lesionadas.

IDEAL PARA:

Sujeción general, actividades atléticas

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Dos tiras regulables para una sujeción y un ajuste personalizados.
- 2 Diseño de perfil fino.
 - Ayuda a proteger la muñeca.

TOMAR LA MEDIDA:

CÓDIGO NACIONAL	CM
240515.8	14.0-24.1

Medir el contorno de la muñeca.



CÓMO UTILIZAR EL SOPORTE:



Abra las correas principales y secundarias. Sitúe la almohadilla sobre la base de la palma de la mano, donde la articulación flexiona. Envuelva con la correa principal y sujete.



Envuelva con la correa secundaria y sujete. Ajuste hasta conseguir el nivel de soporte deseado.

Uso previsto: Proporciona soporte a muñecas rígidas, debilitadas o lesionadas.

PRECAUCIÓN: Este producto contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas.

Composición: Nylon, Rubber, Polyester, Cotton, Polyurethane.

Si empieza a sentir malestar o dolor, o bien estos síntomas persisten o aumentan, deje de usarlo y consulte a un médico.

3M y FUTURO son marcas registradas de 3M.

3M España
c/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027 Madrid

