



# FUTURO™ POLSIERA

46709

 **SUPPORTO  
MODERATO**



**Supporta polsi rigidi, deboli o lesionati.**

## IDEALE PER:

Supporto generale, attività quotidiane

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- ① Due chiusure a strappo regolabili per un adattamento e un supporto personalizzati.
- ② Design dal profilo sottile.
- Aiuta a proteggere il polso.

## TAGLIA:

Codice Prodotto	CM
46709	14.0-24.1

Measure around the wrist.



## COME INDOSSARLO:



Aprire la fascia principale e quella secondaria. Posizionare l'imbottitura sulla base del palmo della mano, dove si piega l'articolazione. Avvolgere e fissare la fascia principale.



Avvolgere e fissare la fascia secondaria. Regolare fino al raggiungimento del livello di supporto desiderato.

Destinazione d'uso: Per supportare polsi rigidi, deboli o lesionati.

**ATTENZIONE: Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale che può causare reazioni allergiche.**

Composition: Nylon, Rubber, Polyester, Cotton, Polyurethane.

Se compaiono, persistono o aumentano dolori e fastidi, interrompere immediatamente l'utilizzo del supporto e consultare il medico.

I prodotti della linea 3M Futuro sono Dispositivi Medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

Comunicazione tecnico-scientifica riservata a Professionisti sanitari, Farmacisti e Fisioterapisti.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.

3M Office  
Via N. Bobbio 21  
20096 Piofello MI  
[www.3mitalia.it/futuro](http://www.3mitalia.it/futuro)

**3M**