




# FUTURO™ ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟ

46709

 ΜΕΤΡΙΑ  
ΣΤΗΡΙΞΗ

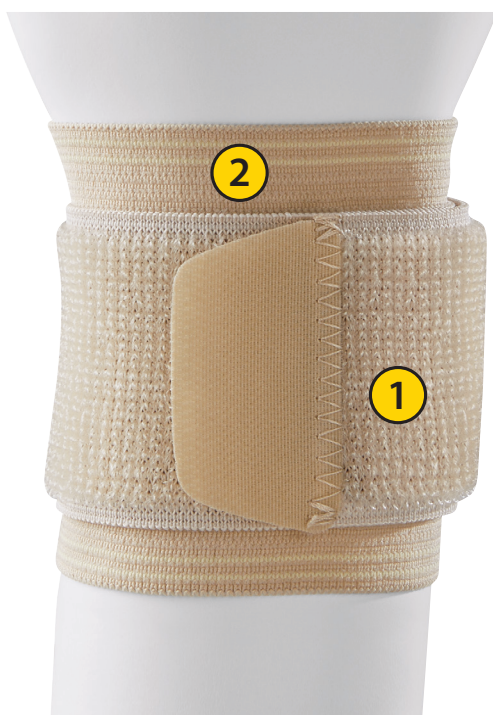

Για στήριξη σε δύσκαμπτο, αδύναμο ή τραυματισμένο καρπό.

## ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ:

Γενική στήριξη, αθλητικές δραστηριότητες

## ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ:

- 1 Δύο ρυθμιζόμενοι ιμάντες, για προσαρμοζόμενη εφαρμογή και στήριξη
- 2 Σχεδιασμός χαμηλού προφίλ.
  - Βοηθά στην προστασία του καρπού.

## ΜΕΓΕΘΗ:

Κωδικός Αναφοράς	Εκατοστά
46709	14.0-24.1

Μετρήστε γύρω από τον καρπό.



## ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΕΣΕΤΕ:



Ανοίξτε τον κεντρικό και τους δευτερεύοντες ιμάντες. Τοποθετήστε το μαξιλαράκι πάνω από τη βάση της παλάμης του χεριού, στο σημείο κάμψης της άρθρωσης. Τυλίξτε και στερεώστε τον κύριο ιμάντα.



Τυλίξτε τον δευτερεύοντα ιμάντα και στερεώστε τον. Ρυθμίστε τους ιμάντες στο επιθυμητό επίπεδο στήριξης.

Προβλεπόμενη χρήση: Για στήριξη σε δύσκαμπτο, αδύναμο ή τραυματισμένο καρπό.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτό το προϊόν περιέχει Λάτεξ Από Φυσικό Καουτσούκ, Το Οποίο Μπορεί Να Προκαλέσει Αλλεργικές Αντιδράσεις.

Σύνθεση: Nylon, Rubber, Polyester, Cotton, Polyurethane.

Αν προκληθούν, επιμένουν ή επιδεινωθούν οι ενοχλήσεις ή ο πόνος, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε γιατρό.

Τα 3M και FUTURO είναι εμπορικά σήματα της 3M.

3M Ελλάς ΜΕΠΕ  
Λεωφόρος Κηφισίας 20  
15125, Μαρούσι, Αθήνα  
www.3M.gr

**3M**