



FUTURO™ STABILISIERENDE SPRUNGGELENK-BANDAGE ANPASSBAR

46645DABI



ATMUNGSAKTIVES
MATERIAL



FEUCHTIGKEITSREGULIEREND

Hilft bei der Stabilisierung und Unterstützung von schwachen, schmerzenden oder verletzten Sprunggelenken.

IDEAL FÜR:

Bietet Unterstützung bei den am häufigsten auftretenden Verletzungen wie Verstauchungen oder Zerrungen

EIGENSCHAFTEN:

- 1 Verstärkte seitliche Stütze verhindert Verdrehen des Sprunggelenks und erneute Verletzungen.
 - 2 Verstellbare Kompression für passgenauen Sitz.
 - 3 Sprunggelenkriemen heben und stützen das Fußgewölbe.
- Passt bequem in den Schuh.

GRÖSSE:

Artikelnummer	PHC	CM
46645DABI	4464788	20.3-25.4



TRAGEANWEISUNG:



Öffnen Sie alle Klettverschlüsse und setzen Sie den Fuß in die Schiene. Ziehen Sie das obere Band durch die Schnalle und schließen Sie das Band. Das Tragegefühl soll fest, aber bequem sein.



Legen Sie das linke Fußband nach oben und über den Fuß und schließen Sie die Klettbefestigung auf der anderen Seite der Sprunggelenk-Bandage.



Legen Sie auf dieselbe Art das rechte Fußband an. Stellen Sie beide Bänder ein, bis Sie unter dem Fuß ein festes, aber bequemes Tragegefühl haben.

3M (Schweiz) GmbH
Consumer Health Care
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
www.3mschweiz.ch/futuro

Verwendungszweck: Unterstützung von steifen, schmerzenden oder verletzten Sprunggelenken.

Zusammensetzung: Polyethylen, Nylon, Polyurethan, Polyester, Elasthan.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.

