



FUTURO™ ESTABILIZADOR DE TOBILLO

46645



**SOPORTE
FIRME**



**MATERIAL
TRANSPIRABLE**



**ÁISLA DE LA
HUMEDAD**

Ayuda a estabilizar y proporciona soporte para tobillos débiles, doloridos o lesionados.

IDEAL PARA:

Proporciona soporte para lesiones comunes como esguinces o torceduras

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Estabilizador lateral reforzado que ayuda a evitar el movimiento lateral y las recaídas.
 - 2 Compresión ajustable para un ajuste personalizado.
 - 3 Las correas para el tobillo elevan y sujetan el arco plantar.
- Se adapta fácilmente al calzado.

TOMAR LA MEDIDA:

CÓDIGO NACIONAL	CM
208964.8	20.3-25.4



CÓMO UTILIZAR EL SOPORTE:



Abra todos los ganchos de anclaje y deslice el pie por el estabilizador. Rodee la tira superior por la hebilla y fijela. Debe de sentir un ajuste firme aunque confortable.



Tire hacia arriba de la tira izquierda y rodee el pie, ancle el gancho en el lado opuesto del estabilizador de tobillo.



Siga las mismas indicaciones para la tira del pie derecho. Ajuste ambas tiras hasta que la base del pie ajuste firme aunque confortable.

Uso previsto: Proporciona soporte para tobillos rígidos, doloridos o lesionados.

Composición: Polyethylene, Nylon, Polyurethane, Polyester, Spandex.

Si empieza a sentir malestar o dolor, o bien estos síntomas persisten o aumentan, deje de usarlo y consulte a un médico.

3M y FUTURO son marcas registradas de 3M.

3M España
c/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027 Madrid

