



FUTURO™ SUPORTE ESTABILIZADOR DE TORNOZELO

46645



SUPORTE
FIRME



MATERIAL
RESPIRÁVEL



MATERIAL
ABSORVENTE

Ajuda a suportar tornozelos frágeis,
doridos ou lesionados.

IDEAL PARA:

Suportar o tornozelo em caso de lesões
comuns, como entorses ou distensões

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS:

- 1 O estabilizador lateral reforçado ajuda a impedir que o tornozelo se desloque e cause nova lesão.
 - 2 Compressão ajustável para um ajuste personalizado.
 - 3 As tiras do tornozelo elevam e suportam o arco do pé.
- Cabe facilmente dentro do sapato.

TAMANHOS:

C.N.P	CM
7948026	20.3-25.4



COMO UTILIZAR:



Abriu todas as faixas de suporte e deslizar o pé no estabilizador. Envolve a canela com a faixa superior, puxe e prenda. Deverá posicionar de uma forma firme mas segura.



Puxe a faixa esquerda pela parte superior do pé prendendo-a no lado oposto do estabilizador de tornozelo.



Seguir as mesmas indicações para a faixa do lado direito. Ajuste ambas as faixas até que o sinta o suporte na parte inferior do pé firme, mas também cómodo.

Finalidade: Para suportar tornozelos rígidos, doridos ou lesionados.

Composição: Polyethylene, Nylon, Polyurethane, Polyester, Spandex.

Se o produto provocar desconforto ou dor, se as dores persistirem ou aumentarem, interrompa a utilização e consulte um médico.

3M e FUTURO são marcas registradas da 3M.

3M España, Sucursal em Portugal
Rua do Mar da China, 3 - 3ª
1990-138 Lisboa

3M