



# FUTURO™ PERFORMANCE ANKELSTABILISATOR

46645



FAST  
STØTTE



PUSTENDE  
MATERIALE



FUKTTRANSPORTERENDE

Stabiliserer og støtter stiv, sår eller skadet ankel.

## IDEELL FOR:

Gir støtte ved vanlige skader som forstuinger og forstrekninger

## NØKKELEGENSKAPER:

- 1 Forsterket sidestabilisator bidrar til å hindre ankelvridning og ny skade.
- 2 Justerbar kompresjon gir tilpasningsmuligheter.
- 3 Ankelstropper løfter og støtter fotbuen.
  - Får lett plass i sko.

## STØRRELSE:

Category Number	CM
46645	20.3-25.4



## VED BRUK:



Åpne alle borrelåser og stikk foten inn i stabilisatoren. Løft toppremmen gjennom spennen, trekk og fest den. Justeringen skal føles stramt, men komfortabelt.



Trekk venstre fotstropp opp og over toppen av foten, og fest borrelåsen til motsatt side av ankelstabilisatoren.



Følg den samme fremgangsmåten for høyre fotstropp. Juster begge stroppene stramt nok rundt nederste del av foten, men slik at det er komfortabelt.

Tiltenkt bruk: Støtte for stiv, sår eller skadet ankel.

Composition: Polyethylene, Nylon, Polyurethane, Polyester, Spandex.

Hvis ubehag eller smerter oppstår, vedvarer eller øker, må du avslutte bruken og kontakte lege.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.

3M Norge AS  
Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm  
Tlf: 06384

**3M**