



FUTURO™ CHEVILLÈRE STABILISATRICE

46645



MATÉRIAU
RESPIRANT



ÉVACUATION DE
L'HUMIDITÉ

Permet de stabiliser et de soutenir une cheville raide, douloureuse ou blessée.

INDIQUÉ POUR:

Fournir un soutien aux blessures courantes telles que les entorses ou les foulures

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- ① Le stabilisateur latéral renforcé contribue à prévenir la torsion de la cheville et une répétition de la blessure.
 - ② Compression réglable pour un ajustement sur mesure.
 - ③ Les sangles de la cheville soulèvent et soutiennent la voûte.
- Se glisse facilement dans la chaussure.

TAILLES:

Category Number	cm
46645	20.3-25.4



MODE D'EMPLOI:



Ouvrez toutes les attaches à crochets et faites glisser le pied dans le stabilisateur. Engagez la sangle supérieure à travers la boucle, tirez et fixez-la. L'ajustement doit être ferme, mais confortable.



Tirez la sangle du pied gauche vers le haut et sur le dessus du pied, en fixant l'attache à crochets sur le côté opposé du stabilisateur de la cheville.



Suivez les mêmes instructions pour la sangle du pied droit. Ajustez les deux sangles jusqu'à ce que le bas du pied soit ferme et confortable.

3M France
Marché Bien Etre et Santé pour le Grand Public
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
542 078 555 RCS Pontoise

Utilisation prévue: Pour soutenir une cheville raide, douloureuse ou blessée.

Composition: Polyéthylène, Nylon, Polyuréthane, Polyester, Spandex.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

