



FUTURO™ PERFORMANCE STABILOIVA NILKKATUKI

46645



HENGITTÄVÄ
MATERIAALI



KOSTEUTTA
SIIRTÄVÄ

Auttaa stabiloimaan ja tukemaan heikkoa, kipeää tai vahingoittunutta nilkkaa.

SOPII KÄYTETTÄVÄKSI:

Tukemaan lieviä vaurioita, kuten venähdyksiä

OMINAISUUDET:

- 1 Vahvistettu sivuvakauttaja auttaa estämään nilkan taittumista ja uutta vauriota.
 - 2 Säädettävä kompressio sopivan istuvuuden löytämiseksi.
 - 3 Nilkkahihnat kohottavat ja tukevat jalan kaarta.
- Istuu helposti kengän sisälle.

KOKO:

Tuotekoodi	CM
46645	20.3-25.4



TUEN ASETTAMINEN:



Avaa kaikki kiinnittimet ja aseta jalka vakaajaan. Vedä ylähihna soljen läpi ja kiinnitä se paikalleen. Tuen tulisi asettua tukevasti mutta mukavasti.



Vedä vasemmanpuoleinen hihna ylöspäin ja jalkaterän päältä ja kiinnitä koukkunauha nilkan vakaajan vastakkaiselle puolelle.



Noudata samoja ohjeita oikeanpuoleisen jalkatuen kanssa. Säädä molempia kiinnitysremmejä, kunnes tuki tuntuu lujalta mutta mukavalta jalkapohjan ympärillä.

Käyttötarkoitus: Jäykän, kipeän tai vahingoittuneen nilkan tukeminen.

Koostumus: polyeteeni, nailon, polyuretaani, polyesteri, elastaani.

Jos käyttö aiheuttaa tai lisää epämiellyttävää oloa tai kipua, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin. 3M ja FUTURO ovat 3M:n tuotemerkkejä.

Suomen 3M Oy
Keilaranta 6
02150 ESPOO

3M