



FUTURO™ PERFORMANCE ANKELSTABILISATOR

46645



FAST
STØTTE



ÅNDBART
MATERIALE



SVEDTRANSPORTERENDE

Hjælper med at stabilisere svage,
ømme eller skadede ankler.

VELEGNET TIL:

Giver støtte til almindelige skader, som
forstuvning og overbelastning

NØGLEFUNKTIONER:

- 1 Forstærket sidestabilisator hjælper med at
hindre anklen i at forvride og genskade.
- 2 Justerbar kompression for
brugertilpasset pasform.
- 3 Ankelstropper løfter og støtter svangen.
● Passer let i din sko.

STØRRELSESVALG:

Varenr	CM
213022	20.3-25.4



SÅDAN BRUGES DEN:



Åbn alle krog og løkke-lukninger, og før
foden ind i stabilisatoren. Stik den øverste
strop igennem spændet, træk og fæstn den.
Pasformen skal føles fast men behagelig.



Træk den venstre fodstrop op over foden, og
fæstn krog og løkke-lukningen på modsatte
side af ankelstøtten.



Følg samme anvisninger for højre fodstrop.
Juster begge stropper, indtil de sidder
til, men stadig behageligt omkring
fodens underside.

3M a/s
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Denmark

3M

Tilsigtet anvendelse: Støtte til stive, ømme eller skadede ankler.

Materialesammensætning: Polyethylen, Nylon, Polyuretan, Polyester, Spandex.

Hvis du oplever smerter som følge af brug, og smerterne varer ved eller øges, skal du ophøre med brugen og søge læge.

3M og FUTURO er varemærker tilhørende 3M.