



# FUTURO™ POLSBANDAGE

46378



Ondersteunt een stijve, zwakke of  
geblesseerde pols.

## IDEAAL VOOR:

Algemene ondersteuning, sportactiviteiten

## HOOFDKENMERKEN:

- 1 Twee verstelbare riemen voor een goede pasvorm en ondersteuning.
- 2 Ontwerp met laag profiel.
  - Helpt om de pols te beschermen.

## MAAT:

Referentie	CNK	CM
46378	2251577	14.0-24.1

Meet de omtrek van de pols.



## DRAAGINSTRUCTIES:



Open de hoofd- en secundaire riemen.  
Positioneer de pad over de basis van de  
handpalm, waar het gewricht buigt. Wikkel de  
hooftriem om de pols en maak deze vast.



Wikkel de secundaire riem om de pols en maak  
deze vast. Stel de brace in tot het gewenste  
niveau van ondersteuning is bereikt.

Beoogd gebruik: Ondersteunt een stijve, zwakke of geblesseerde pols.

**LET OP: Dit product bevat latex uit natuurrubber en kan mogelijk allergische reacties veroorzaken.**

Samenstelling: Nylon, Rubber, Polyester, Katoen, Polyurethaan.

Stop het gebruik en raadpleeg een arts als er ongemak of pijn ontstaat, of als de pijn/het ongemak aanhoudt of verergert.

3M en FUTURO zijn handelsmerken van 3M.

3M Belgium bvba/sprl  
Afd. Consumer Health Care  
www.3M.BE/futuro

3M Nederland B.V.  
Afd. Consumer Health Care  
www.3M.NL/futuro

