



FUTURO™ BANDAGE DU POIGNET

46378



**Soutient un poignet raide,
faible ou blessé.**

INDIQUÉ POUR:

Soutien général, activités sportives

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Deux sangles réglables pour une mise en place ajustée.
- 2 Design profilé.
- Aide à protéger le poignet.

TAILLES:

Référence	CNK	CM
46378	2251577	14.0-24.1

Mesurer le tour du poignet.



MODE D'EMPLOI:



Ouvrez la sangle principale et secondaire. Positionnez le coussinet sur la base de la paume de la main, à la pliure des articulations. Enroulez la sangle principale et fixez-la.



Enroulez la sangle secondaire et fixez-la. Ajustez afin d'obtenir le niveau de support souhaité.

Utilisation prévue: Pour soutenir un poignet raide, faible ou blessé

AVERTISSEMENT: Ce produit contient du latex en caoutchouc naturel pouvant entraîner des réactions allergiques.

Composition: Nylon, Caoutchouc, Polyester, Coton, Polyuréthane.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

3M Belgium bvba/sprl
Dép. Consumer Health Care
www.3m.be/futuro-fr

