



FUTURO™ CABESTRILLO

46204



SOPORTE
LIGERO



MATERIAL
TRANSPIRABLE

Uso previsto: Ayuda a sujetar el brazo.

Composición: Polyester, POM, PVC, Cotton, Polyurethane Foam.

Si empieza a sentir malestar o dolor, o bien estos síntomas persisten o aumentan, deje de usarlo y consulte a un médico.

3M y FUTURO son marcas registradas de 3M.

Ayuda a soportar el peso del brazo.

IDEAL PARA:

Proporciona soporte durante la recuperación de un hueso fracturado, esguince, cirugía o como soporte general para el brazo

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Almohadilla que amortigua la presión sobre el hombro.
- 2 Hebilla de apertura rápida.
- 3 La trabilla para el pulgar que mantiene la mano en la posición ideal y ayuda a reducir la fatiga.

TOMAR LA MEDIDA:

CÓDIGO NACIONAL	Talla
168700.5	Ajustable

CÓMO UTILIZAR EL SOPORTE:



Desabroche la tira del hombro de la bolsa de la hebilla. Meta el brazo dentro de la cartuchera. Fije la hebilla de cierre. El brazo debe de descansar horizontalmente.



Traiga la tira alrededor de la espalda y sobre el hombro opuesto. Fije la hebilla de cierre. El brazo debe de descansar horizontalmente.



Introduzca el dedo pulgar en el asa. Coloque la almohadilla sobre el hombro para mayor comodidad. Para quitarlo, simplemente deslice la correa sobre su cabeza. No debería ser necesario desabrochar una vez que esté ajustado correctamente.

3M España
c/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027 Madrid

