



FUTURO™ APOIO DE BRAÇO

46204



Ajuda a suportar o peso do braço.

IDEAL PARA:

Proporcionar suporte durante a recuperação de uma fratura óssea, entorse, cirurgia, ou para suporte geral do braço

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- 1 Almofadas de conforto com efeito amortecedor no ombro.
- 2 Fivela de libertação rápida.
- 3 A argola de polegar mantém a mão em posição confortável e ajuda a reduzir a fadiga.

TAMANHOS:

C.N.P	Tamanho
6298786	Ajustável



MATERIAL
RESPIRÁVEL

Finalidade: Para ajudar a suportar o braço.

Composição: Polyester, POM, PVC, Cotton, Polyurethane Foam.

Se sentir desconforto ou dor, se as dores persistirem ou aumentarem, interrompa a utilização e consulte um médico.

3M e FUTURO são marcas registradas da 3M.

COMO USAR:



Desapertar a faixa do apoio de braço. Inserir o braço no suporte com o ombro bem assente no canto.



Passar a faixa por trás das costas e sobre o ombro oposto. Prenda a faixa no suporte. Deixe o braço descansar.



Introduza o dedo polegar na asa. Coloque a parte almofadada sobre o ombro para uma maior comodidade. Para retirar, simplesmente deslize a correia sobre a sua cabeça. Não deveria ser necessário desapertar uma vez que já fez o ajuste correctamente.

3M España, Sucursal em Portugal
Rua do Mar da China, 3 - 3ªA
1990-138 Lisboa

