



FUTURO™ ECHARPE

46204

 SOUTIEN
LÉGER



MATÉRIAU
RESPIRANT

Utilisation prévue: Pour aider à soutenir le coude et le bras.

Composition: Polyester, POM, PVC, Cotton, Polyurethane Foam.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

Aide à soutenir le poids du bras.

INDIQUÉ POUR:

Soutien pendant la convalescence à la suite d'une fracture, d'une entorse, d'une intervention chirurgicale ou pour un soutien général du bras

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Le coussinet Confort procure un amortissement à l'épaule.
- 2 Boucle à ouverture rapide.
- 3 La boucle pour le pouce maintient la main dans une position confortable et aide à réduire la fatigue.

TAILLES:

Category Number	Tailles
46204	Réglable

MODE D'EMPLOI:



Ouvrir l'écharpe. Mettre le bras avec le coude calé dans l'angle.



Placer la sangle dans votre dos sur l'épaule opposée. Accrocher la sangle dans la boucle. Le bras doit reposer à l'horizontal.



Insérez le pouce dans la boucle. Placez le coussinet sur l'épaule pour plus de confort. Pour l'enlever, glissez simplement la sangle par dessus votre tête. Il n'est pas nécessaire de déboucler une fois que l'écharpe est correctement ajustée.

3M France
Marché Bien Etre et Santé pour
le Grand Public
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
542 078 555 RCS Pontoise

3M