



# FUTURO™ MITELLA

46204



LICHTE  
STEUN



ADEMEND  
MATERIAAL

Beoogd gebruik: Ondersteuning van de arm.

Samenstelling: Polyester, POM, PVC, Katoen, Polyurethaanschuim.

Stop het gebruik en raadpleeg een arts als er ongemak of pijn ontstaat, of als de pijn/het ongemak aanhoudt of verergert.

3M en FUTURO zijn handelsmerken van 3M.

Ondersteunt het gewicht van de arm.

## IDEAAL VOOR:

Steun bij herstel van een botbreuk, verstuiking of operatie of voor algemene ondersteuning van de arm

## HOOFDKENMERKEN:

- 1 Comfortkussen voor verlichting van de druk op de schouder.
- 2 Makkelijk los te maken gesp.
- 3 Duimlus die de hand in een comfortabele houding houdt en moeheid helpt voorkomen.

## MAAT:

Referentie	CNK	Maat
46204	1287267	Verstelbaar


## DRAAGINSTRUCTIES:



Maak de schouderriem los uit de gesp van de mitellazak. Plaats de arm in de zak met de elleboog juist in de hoek geïmponeerd.



Breng de riem aan over uw rug en over de andere schouder. Maak de riem vast in de gesp. De arm moet horizontaal rusten.

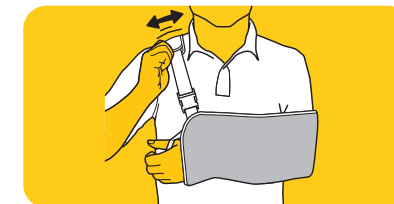

Steek een duim in de lus. Plaats de pad over de schouder voor comfort. Om te verwijderen: schuif eenvoudig de riem over het hoofd. De gesp hoeft niet te worden losgemaakt als deze correct is afgesteld.

3M Belgium bvba/sprl  
Afd. Consumer Health Care  
www.3M.BE/futuro

3M Nederland B.V.  
Afd. Consumer Health Care  
www.3M.NL/futuro

