



FUTURO™ FAJA ABDOMINAL DE COMPRESIÓN

46200-01



SOPORTE
MODERADO

Sujeta y eleva el abdomen.

IDEAL PARA:
Soporte abdominal postquirúrgico

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Diseño anatómico, ceñido y envolvente con cierres ajustables para un ajuste personalizado.
- 2 Revestimiento afelpado para mayor comodidad.

TOMAR LA MEDIDA:

CÓDIGO NACIONAL	TALLA	CM
328331.1	M	81.3-106.7
328990.4	L	106.7-132.1



MATERIAL
TRANSPIRABLE


Uso previsto: Para sujetar un abdomen caído.

Composición: Polyester, Nylon, Spandex, Cotton, Polyurethane.

Si empieza a sentir malestar o dolor, o bien estos síntomas persisten o aumentan, deje de usarlo y consulte a un médico.

3M y FUTURO son marcas registradas de 3M.

CÓMO UTILIZAR EL SOPORTE:

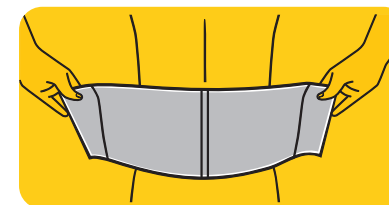

Abra la faja y tiendala sobre la cama, la felpa quedará hacia arriba y la etiqueta de FUTURO en la parte superior opuesta.

Túmbese y coloque la faja bajo su espalda, agarre la parte ancha y extiendala sobre su abdomen sobre el apósito quirúrgico.



Exhale aire completamente y con su mano derecha tire del lado de la faja hasta que la almohadilla quede cubierta. Debe de quedar ajustado aunque confortable. Estire la faja tanto como necesite hasta eliminar las arrugas.

3M España
c/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027 Madrid

