



# FUTURO™

## FAIXA DE SUPORTE ABDOMINAL PÓS-CIRÚRGICO

46200-01



SUPORTE  
MODERADO

Suporta e eleva o abdómen.

**IDEAL PARA:**

Suporte central pós-cirurgia

**PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:**

- 1 Design com contornos, arredondado, envolvente, com fechos ajustáveis para um ajuste personalizado.
- 2 Revestimento aveludado para mais conforto.

**TAMANHOS:**

C.N.P	Size	CM
6176719	M	81.3-106.7
6176727	L	106.7-132.1



MATERIAL  
RESPIRÁVEL


Finalidade: Suportar um abdómen flácido.

Composição: Polyester, Nylon, Spandex, Cotton, Polyurethane.

Se o produto provocar desconforto ou dor, se as dores persistirem ou aumentarem, interrompa a utilização e consulte um médico.

3M e FUTURO são marcas registradas da 3M.

**COMO UTILIZAR:**

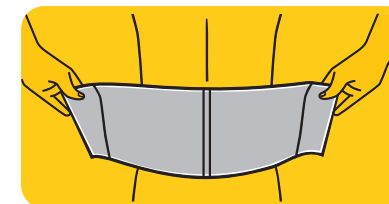

Abrir a faixa abdominal e colocá-la sobre uma cama com o tecido a apontar para cima e a etiqueta Futuro no topo do lado oposto.

Deite-se e posicione a faixa abdominal sob as costas. Agarre na faixa de ambos os lados e estire sob a zona abdominal ou sobre o penso cirúrgico.



Exale completamente e com a mão direita, puxe o lado direito da faixa sobre a parte inferior e prenda. O ajuste deverá ser firme mas confortável. Estire a faixa o necessário para que não fique enrugado.

3M España, Sucursal em Portugal  
Rua do Mar da China, 3 - 3ªA  
1990-138 Lisboa

**3M**