



FUTURO™ FASCIA ELASTICA DI SUPPORTO ADDOMINALE

46200-01



Supporta e solleva l'addome.

IDEALE PER:

Supporto post-operatorio per il tronco

**CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO:**

- 1 Design sagomato, affusolato e avvolgente con chiusure regolabili per un adattamento personalizzato.
- 2 Rivestimento felpato per il comfort.


TAGLIA:

Codice Prodotto	Taglia	CM
46201	M	81.3-106.7
46200	L	106.7-132.1



**MATERIALE
TRASPIRANTE**

COME INDOSSARLO:

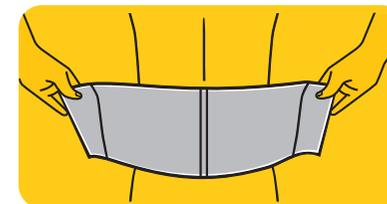

Aprire e stendere la fascia su un letto, con la parte felpata verso l'alto e l'etichetta FUTURO™ sul retro.

Stendersi posizionando la fascia sotto la schiena. Afferrare l'intero pannello e tirarlo sull'addome o sopra il bendaggio chirurgico.



Espirare completamente e con la mano destra tirare il lato destro della fascia sopra il pannello fissando lo strappo. Il fissaggio deve risultare saldo ma confortevole. Raddrizzare opportunamente la fascia per rimuovere le grinze.

Destinazione d'uso: Per supportare l'addome rilassato.

Composition: Polyester, Nylon, Spandex, Cotton, Polyurethane.

Se compaiono, persistono o aumentano dolori e fastidi, interrompere immediatamente l'utilizzo del supporto e consultare il medico.

I prodotti della linea 3M Futuro sono Dispositivi Medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

Comunicazione tecnico-scientifica riservata a Professionist sanitari, Farmacisti e Fisioterapisti.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.

3M Office
Via N. Bobbio 21
20096 Piofello MI
www.3mitalia.it/futuro

