



FUTURO™

CEINTURE DE SOUTIEN ABDOMINALE

46200-01



SOUTIEN
MODÉRÉ

Soutient et soulève l'abdomen.

INDIQUÉ POUR:

Support de base post-chirurgical

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Conception enveloppante, effilée et profilée, avec des attaches réglables pour un ajustement personnalisé.
- 2 Doublure douce pour le confort.

TAILLES:

| Category Number | Size | cm |
|-----------------|------|-------------|
| 46201 | M | 81.3-106.7 |
| 46200 | L | 106.7-132.1 |



MATÉRIAU
RESPIRANT


Utilisation prévue: Soutenir un abdomen affaissé.

Composition: Polyester, Nylon, Spandex, Cotton, Polyurethane.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

MODE D'EMPLOI:

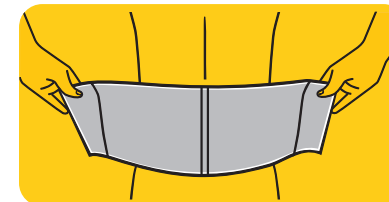

Ouvrez le liant et posez-le sur un lit, la doublure douce vers le haut et l'étiquette FUTURO en haut sur le côté opposé.

Allongez-vous et positionnez le liant sous votre dos. Saisissez le coussinet large et étirez-le sur l'abdomen ou sur le pansement chirurgical.



Expirez complètement et, avec votre main droite, tirez le côté droit du liant sur le coussinet et attachez la fixation. L'ajustement doit être ferme, mais confortable. Au besoin, étirez le liant pour supprimer les plis.

3M France
Marché Bien Etre et Santé pour le Grand Public
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
542 078 555 RCS Pontoise

