



FUTURO™ COMPRESSIEBANDAGE VOOR DE BUIK

46200-01



Ondersteunt de buik en tilt deze op.

IDEAAL VOOR:

Ondersteuning van de buikspieren na een operatie

HOOFDKENMERKEN:

- ① Voorgevormd, taps toelopend wikkelontwerp met verstelbare sluitingen voor een pasvorm op maat.
- ② Comfortabele en zachte voering.

MAAT:



Referentie	CNK	Maat	CM
46201	3926722	M	81.3-106.7
46200	3926110	L	106.7-132.1



ADEMEND
MATERIAAL


Beoogd gebruik: Ondersteuning van een hangende buik.

Samenstelling: Polyester, Nylon, Spandex, Katoen, Polyurethaan.

Stop het gebruik en raadpleeg een arts als er ongemak of pijn ontstaat, of als de pijn/het ongemak aanhoudt of verergert.

3M en FUTURO zijn handelsmerken van 3M.

DRAAGINSTRUCTIES:

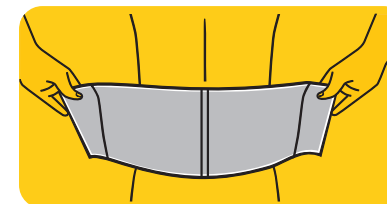

Open de band en leg de bandage op een bed met de pluchen voering naar boven gericht en het FUTURO label boven op de tegenovergestelde zijde.

Lig neer en plaats de band onder uw rug. Neem het brede kussen en stretch het over uw buik, over het chirurgische verband.



Adem volledig uit en trek de rechterzijde van de band met uw rechterhand over het kussen en maak de sluiting vast. De bandage dient nauwsluitend, doch comfortabel aan te voelen. Trek de band recht indien nodig, om rimpels te verwijderen.

3M Belgium bvba/sprl
Afd. Consumer Health Care
www.3M.BE/futuro

3M Nederland B.V.
Afd. Consumer Health Care
www.3M.NL/futuro

