



FUTURO™

CEINTURE DE SOUTIEN ABDOMINALE

46200-01



SOUTIEN
MODÉRÉ

Soutient et soulève l'abdomen.

INDIQUÉ POUR:

Support de base post-chirurgical

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Conception enveloppante, effilée et profilée, avec des attaches réglables pour un ajustement personnalisé.
- 2 Doublure douce pour le confort.

TAILLES:



Référence	CNK	Taille	CM
46201	3926722	M	81.3-106.7
46200	3926110	L	106.7-132.1



MATÉRIAU
RESPIRANT


Utilisation prévue: Soutenir un abdomen affaissé.

Composition: Polyester, Nylon, Spandex, Coton, Polyuréthane.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

MODE D'EMPLOI:

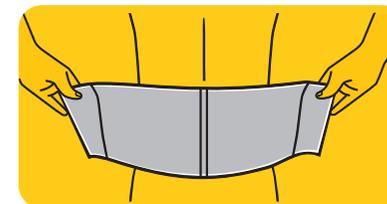

Ouvrez la ceinture et posez-la sur un lit, la doublure douce vers le haut et l'étiquette FUTURO en haut sur le côté opposé.

Allongez-vous et positionnez la ceinture sous votre dos. Saisissez le coussinet large et étirez-le sur l'abdomen ou sur le pansement chirurgical.



Expirez complètement et, avec votre main droite, tirez le côté droit du support sur le coussinet et attachez la fixation. L'ajustement doit être ferme, mais confortable. Au besoin, étirez la ceinture pour supprimer les plis.

3M Belgium bvba/sprl
Dép. Consumer Health Care
www.3m.be/futuro-fr

3M