



FUTURO™ COMFORT KNÄSTÖD MED SKENOR

46163-65



VENTILERANDE
MATERIAL

Avsedd användning: Ger stöd till stela, svaga eller skadade knän.

Material: Metall, Nylon, Polyester, Spandex, Bomull, Polyuretan.
Om obehag eller smärta uppstår, kvarstår eller ökar, avbryt användningen och kontakta läkare.
3M and FUTURO are trademarks of 3M.

Ger omedelbar kompression och lateral stabilisering.

PERFEKT FÖR:

Generellt stöd vid enklare knäskador.

VIKTIGA FUNKTIONER:

- 1 Stretchmaterialet håller stödet på plats.
 - 2 Öppning över knäskålen ger stöd.
 - 3 Skenor på båda sidor för ökad stabilitet utan att begränsa rörelsefriheten.
- Designat för optimal passform .

STORLEK:

Artikel Nummer	Storlek	CM
46163	S	30.5-36.8
46164	M	36.8-43.2
46165	L	43.2-49.5



ANVÄNDNING:



Trä stödbandaget över foten.



Dra stödet upp över knät.



Se till att patellahålet placeras på knäskålen.

3M Svenska AB
Herrjärva torg 4,
170 67 Solna
Sweden

