




FUTURO™ GENOUILLÈRE STABILISATRICE

46163-65

 SOUTIEN
MODÉRÉ

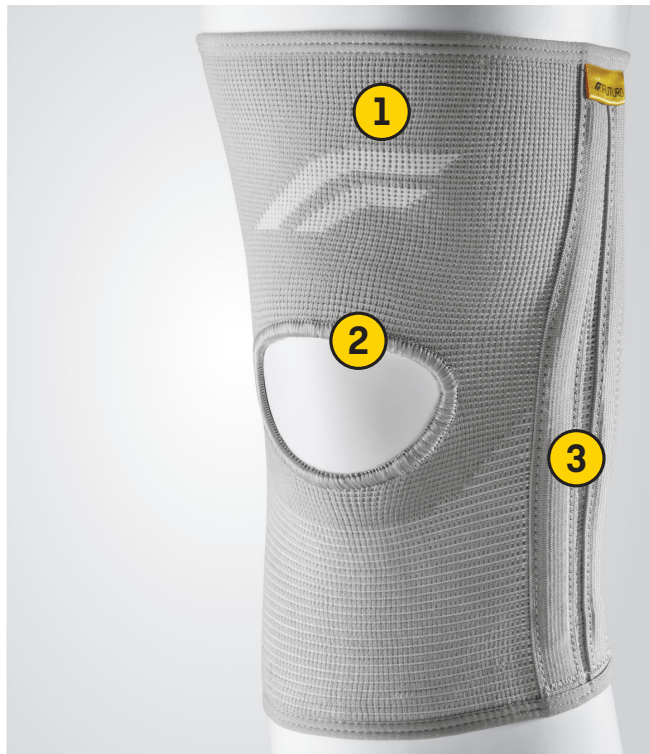

MATÉRIAU
RESPIRANT

Utilisation prévue: Aide à soutenir un genou raide, faible ou blessé.

Composition: Métal, Nylon, Polyester, Spandex, Coton, Polyuréthane.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

Fournit une stabilisation latérale et
une compression immédiate.

INDIQUÉ POUR:

Fournir un soutien aux blessures courantes telles que les entorses ou les foulures. Soutien général.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Un matériau extensible dans 4 directions qui permet le maintien en place de la genouillère.
 - 2 Conception avec ouverture pour soutien de la rotule.
 - 3 Les stabilisateurs latéraux fournissent une stabilité supplémentaire sans limiter les mouvements.
- Design profilé pour un ajustement optimal.

TAILLES:

Référence	CNK	Taille	CM
46163	2251627	S	30.5-36.8
46164	2251601	M	36.8-43.2
46165	2251619	L	43.2-49.5



MODE D'EMPLOI:



Faites glisser le support au-dessus du pied.



Tirez le support sur le genou.



Assurez-vous que le l'ouverture centrale de la rotule se place sur cette dernière.

3M Belgium bvba/sprl
Dép. Consumer Health Care
www.3m.be/futuro-fr

3M