

# **FUTURO™ CUSTOM DIAL TENNIS-ELLENBOGEN-BANDAGE ANPASSBAR**

45980DABI





Einstellrad ermöglicht einfach anpassbaren, punktgenauen Druck auf schmerzenden Unterarm.

## IDEAL FÜR:

Tennisarm, Tendinitis, Aktivitäten mit sich ständig wiederholenden Bewegungen.

#### **EIGENSCHAFTEN:**

- 1 Einstellrad bietet punktgenauen Druck auf die Unterarmsehen, ohne dabei den Druck auf den restlichen Unterarm zu erhöhen.
- 2 Gelkissen passt sich an und sorgt bei Bewegung für komfortable Stabilisierung rund um den Arm.
- 3 Gewährleistet den festgelegten Druck, bis er über das Einstellrad neu reguliert wird.

### GRÖSSE:

Artikelnummer	PHC	СМ
45980DABI	6446688	17.8-35.6



Wird um den Unterarm unterhalb des Ellenbogens gemessen.

#### TRAGEANWEISUNG:



Ziehen Sie den Klettverschluss durch die Schnalle, sodass eine Schlaufe entsteht. Positionieren Sie die Bandage unterhalb des Ellenbogengelenks. Das Druckpolster sollte gegen die Sehne gerichtet sein.



Spannen Sie die Bandage auf eine angenehme, leichte Kompression und schließen Sie das Band. Drehen Sie das Einstellrad im Uhrzeigersinn, bis die gewünschte Kompression erreicht ist. Stellen Sie das Einstellrad so ein, dass der Druck je nach Aktivitätsgrad erhöht oder verringert werden kann, ziehen Sie es nicht zu fest an.

Zum Abnehmen lösen Sie das Einstellrad, bis der Druck genommen ist, haken das Band aus und schieben die Bandage vom Untergrm

3M (Schweiz) GmbH Consumer Health Care Eggstrasse 93 8803 Rüschlikon www.3mschweiz.ch/futuro



Verwendungszweck: Unterstützung von Ellenbogen und Arm.

Zusammensetzung: Polycarbonat, Nylon, Polyurethan, Thermoplastisches Elastomer, Metall, Polyester.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.
3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.