



FUTURO™ SOPORTE PARA CODO DE TENISTA CON AJUSTE DE PRECISIÓN

45980



El dial permite ajustar fácilmente el nivel de presión en el brazo dolorido.

IDEAL PARA:

Codo de tenista, tendinitis, actividades con movimientos repetitivos

CARACTERÍSTICAS:

- 1 El dial permite ajustar fácilmente la presión sobre el tendón del antebrazo afectado sin presionar las zonas adyacentes.
- 2 La almohadilla de gel se adapta a la forma del brazo y proporciona confort adicional al tendón durante el movimiento.
- 3 Mantiene la presión seleccionada hasta que se ajusta el dial.

TOMAR LA MEDIDA:

CÓDIGO NACIONAL	CM
170989.9	17.8-35.6



Medir el contorno del antebrazo por debajo del codo.

CÓMO UTILIZAR EL SOPORTE:



Tire del gancho de ajuste sobre la ranura para crear un asa en la tira. Aplíquela al antebrazo bajo el pliegue del codo. La almohadilla de presión debe estar colocado sobre el tendón.



Ajuste la tira hasta un nivel confortable de baja compresión y fije el gancho en la correa. Apriete la rosca girando en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar el nivel de compresión deseado. Ajuste la presión con el dial en función del nivel actividad. No apriete en exceso.

Para liberarlo. Afloje la rosca hasta que no sienta presión. Tire del gancho desde la correa y deslice el brazo hacia fuera.

Uso previsto: Para sujetar el codo y el brazo.

Composición: Polycarbonato, Nylon, Polyurethane, Thermoplastic Elastomer, Metal, Polyester.

Si empieza a sentir malestar o dolor, o bien estos síntomas persisten o aumentan, deje de usarlo y consulte a un médico.

3M y FUTURO son marcas registradas de 3M.

3M España
c/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027 Madrid

