



FUTURO™ SUPORTE ESTABILIZADOR PARA COTOVELO DE TENISTA

45980



O estabilizador aplica pressão localizada no antebraço dorido.

IDEAL PARA:

Cotovelo do tenista, tendinite, movimentos repetitivos

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- 1 O estabilizador aplica pressão localizada no tendão do antebraço sem aumentar a pressão à volta do braço.
- 2 A almofada de gel adapta-se à forma do braço e proporciona mais conforto ao tendão em movimento.
- 3 Mantém a pressão definida até que o estabilizador seja ajustado.

TAMANHOS:

C.N.P	CM
6316232	17.8-35.6



Tire a medida à volta do antebraço abaixo do cotovelo.

COMO UTILIZAR:



Deslize a tira de ajuste pela fivela de modo a que esta de a volta. Aplicar no antebraço a seguir à dobra do cotovelo. A almofada de pressão deverá estar colocada na parte exterior do antebraço.



Apertar a tira de uma forma cómoda com pouca pressão e prenda a tira no suporte. Girar a roldana no sentido dos ponteiros do relógio até que o nível de compressão desejada é atingida. Ajustar a roldana para aumentar ou diminuir a pressão conforme o nível de atividade. Não apertar demasiado.

Para remover, desapertar a roldana até que não sinta pressão. Remover a tira da ranhura e deslizar pelo antebraço.

Finalidade: Para suportar cotovelo e braço.

Composição: Polycarbonate, Nylon, Polyurethane, Thermoplastic Elastomer, Metal, Polyester.

Se sentir desconforto ou dor, se as dores persistirem ou aumentarem, interrompa a utilização e consulte um médico.

3M e FUTURO são marcas registradas da 3M.

3M España, Sucursal em Portugal
Rua do Mar da China, 3 - 3ªA
1990-138 Lisboa

