



FUTURO™ CUSTOM DIAL SPORT TENNIS-ELLENBOGEN-BANDAGE ANPASSBAR

45980DABI



Einstellrad ermöglicht einfach anpassbaren, punktgenauen Druck auf schmerzenden Unterarm.

IDEAL FÜR:

Tennisarm, Tendinitis, Aktivitäten mit sich ständig wiederholenden Bewegungen.

EIGENSCHAFTEN:

- 1 Einstellrad bietet punktgenauen Druck auf die Unterarmsehne, ohne dabei den Druck auf den restlichen Unterarm zu erhöhen.
- 2 Gelkissen passt sich an und sorgt bei Bewegung für komfortable Stabilisierung rund um den Arm.
- 3 Gewährleistet den festgelegten Druck, bis er über das Einstellrad neu reguliert wird.


GRÖSSE:

Artikelnummer	PZN	CM
45980DABI	4440687	17.8-35.6

Wird um den Unterarm unterhalb des Ellenbogens gemessen.



TRAGEANWEISUNG:

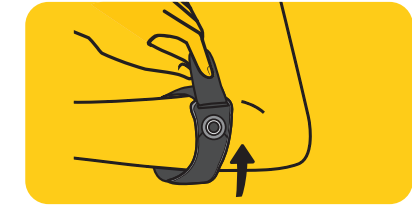

Ziehen Sie den Klettverschluss durch die Schnalle, sodass eine Schlaufe entsteht. Positionieren Sie die Bandage unterhalb des Ellenbogengelenks. Das Druckpolster sollte gegen die Sehne gerichtet sein.



Spannen Sie die Bandage auf eine angenehme, leichte Kompression und schließen Sie das Band. Drehen Sie das Einstellrad im Uhrzeigersinn, bis die gewünschte Kompression erreicht ist. Stellen Sie das Einstellrad so ein, dass der Druck je nach Aktivitätsgrad erhöht oder verringert werden kann, ziehen Sie es nicht zu fest an.

Zum Abnehmen lösen Sie das Einstellrad, bis der Druck genommen ist, haken das Band aus und schieben die Bandage vom Unterarm.

Verwendungszweck: Unterstützung von Ellenbogen und Arm.

Zusammensetzung: Polycarbonat, Nylon, Polyurethan, Thermoplastisches Elastomer, Metall, Polyester.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.

3M Österreich GmbH
Consumer Health Care, Euro Plaza, Gebäude J
Kranichbergstrasse 4, 1120 Wien
www.futuro.de

