



FUTURO™ ELLEBOOGBRACE CUSTOM DIAL

45980



Verstelknop voor eenvoudig instelbare lokale druk op de pijnlijke onderarm.

IDEAAL VOOR:

Tenniselleboog, tendinitis, herhaalde handelingen

HOOFDKENMERKEN:

- 1 Verstelknop voor lokale druk op de pezen van de onderarm, zonder de druk op de hele arm te verhogen.
- 2 Gelpad die zich aanpast en comfortabel meebeweegt met de pees.
- 3 Geeft een constante druk zolang de verstelknop niet wordt aangepast.

MAAT:

Referentie	CNK	CM
45980	3049996	17.8-35.6



Meet de omtrek van de onderarm onder de elleboog.

DRAAGINSTRUCTIES:



Trek de haaksluiting door de gesp om een lus te maken in de band. Breng aan op de onderarm onder de bocht van de elleboog. Het drukkussentje dient tegen de pees geplaatst te worden.



Trek de riem aan totdat er een comfortabele lichte druk wordt gevoeld en bevestig het haaklijpje op de riem. Draai de verstelknop met de wijzers van de klok mee tot het gewenste compressieniveau wordt bereikt. De druk kan worden verhoogd of verlaagd, in functie van het activiteitsniveau, aan de hand van de verstelknop. Niet te strak aandraaien.

Om te verwijderen : draai de verstelknop los tot u geen druk meer voelt; verwijder het haaklijpje van de band en neem de bandage van de onderarm af.

Beoogd gebruik: Ter ondersteuning van de elleboog en arm.

Samenstelling: Polycarbonaat, Nylon, Polyurethaan, Thermoplastisch elastomeer, Metaal, Polyester.

Stop het gebruik en raadpleeg een arts als er ongemak of pijn ontstaat, of als de pijn/het ongemak aanhoudt of verergert.

3M en FUTURO zijn handelsmerken van 3M.

3M Belgium bvba/sprl
Afd. Consumer Health Care
www.3M.BE/futuro

3M Nederland B.V.
Afd. Consumer Health Care
www.3M.NL/futuro

