



FUTURO™ TENNIS-ELLENBOGEN-BANDAGE ANPASSBAR

45975DABI

 MITTLERER
STÜTZGRAD



ATMUNGSAKTIVES
MATERIAL



FEUCHTIGKEITSREGULIEREND

**Bietet gezielten Druck bei Schmerzen
des Unterarms.**

IDEAL FÜR:

Tennisarm, Tendinitis, Aktivitäten mit sich
ständig wiederholenden Bewegungen

EIGENSCHAFTEN:

- 1 Polster übt sanften, gezielten Druck auf
Unterarmsehnen aus.
- 2 Verstellbarer Riemen für passgenauen Sitz.

GRÖSSE:

Artikelnummer	PHC	CM
45975DABI	4464765	17.8-35.6



Wird um den Unterarm unterhalb des Ellenbogens gemessen.

TRAGEANWEISUNG:



Setzen Sie die Sehnenpelotte gegen die
Haut und ziehen Sie den Verschluss durch
die Schnalle.



Richten Sie den Verschluss nach außen und
positionieren Sie die Sehnenpelotte unterhalb
des Ellenbogens und am Unterarm nach
außen zeigend.



Spannen Sie das Band, bis die Bandage eng,
aber bequem anliegt.

Verwendungszweck: Unterstützung von steifen, schwachen oder verletzten Ellenbogen und Unterarmen.

Zusammensetzung: Polyurethan, Nylon, Acetal, Polyester.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.

3M (Schweiz) GmbH
Consumer Health Care
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
www.3mschweiz.ch/futuro

3M