



# FUTURO™ BANDAGE COUDE TENNIS ELBOW

45975



MATÉRIAU  
RESPIRANT



ÉVACUATION DE  
L'HUMIDITÉ

Utilisation prévue: Pour soutenir un avant-bras ou un coude raide, faible ou blessé.

Composition: Polyuréthane, Nylon, Acétal, Polyester.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

Fournit une pression ciblée pour les douleurs de l'avant-bras.

## INDIQUÉ POUR:

Épicondylite, tendinite, activités à mouvement répétitif

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Le coussinet place une pression délicate et ciblée sur le tendon de l'avant-bras.
- 2 Sangle réglable pour un ajustement sur mesure.

## TAILLES:

Référence	PHC	CM
45975	4464765	17.8-35.6



Mesurez autour de l'avant-bras sous le coude.

## MODE D'EMPLOI:



Tirez la fermeture à travers la boucle, en positionnant le coussinet de protection du tendon contre la peau.



En orientant l'attache vers l'extérieur, positionnez le coussinet de protection du tendon sous le coude vers l'avant-bras externe.



Serrez la sangle jusqu'à ce que l'ajustement soit ferme, mais confortable.

3M (Suisse) S.à r.l.  
Consumer Health Care  
Eggstrasse 93  
8803 Rüslikon  
www.3msuisse.ch/futuro

